



Qualitäts-Management
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung
nach DIN EN ISO 9001:2000




Medizintechnik &
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel
Prüfungen und Reparaturen


Cetro



Nabelschnurring

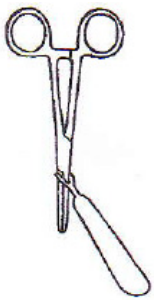

1. Schieben Sie die Klemme durch die Schlaufe des Nabelschnurrings. Klemmen Sie mit einer weiteren Klemme die Nabelschnur nahe der Mutter ab.

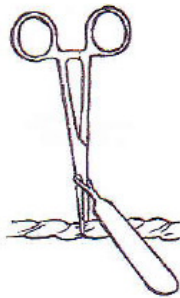

2. Klemmen Sie mit der Klemme, die den Nabelschnurring hält, nahe dem Kind ab. Achten Sie darauf, dass die Nabelschnur ganz von der Klemme erfasst wird.



3. Schneiden Sie die Nabelschnur auf der mütterlichen Seite ab und schließen Sie die Klemme mit dem Nabelschnurring.



Artikel-Nr. 9607

Der Nabelschnurring ist aus reinem Latex gefertigt.


Da der Nabelschnurring steril verpackt ist, kann er sofort verwendet werden, ohne weitere Sterilisierungsmaßnahmen.

Der Ring ist sehr flexibel und kann auch für sehr dicke Nabelschnüre verwendet werden.


Zum Aufbringen des Ringes wird nur die Standard-Klemme benötigt.

Vorteile:


- Einfach zu handhaben.
- Ein einziger dehnbare Ring.
- Einheitsgröße.
- Muss nicht entfernt werden.
- Für das Kind angenehmer.
- Stört nicht beim Wickeln.

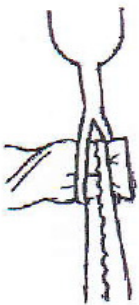

4. Nehmen Sie den Griff des Nabelschnurrings und ziehen ihn von der Klemme über die Nabelschnur.

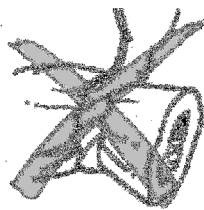

5. WICHTIG!
Der Ring darf sich nicht verdrehen, da er sonst reißen kann.

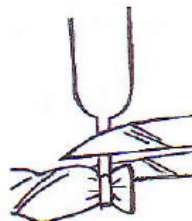

6. Schneiden Sie den Griff des Nabelschnurrings nahe der Nabelschnur ab.



7. Fertig!