



Qualitäts-Management
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung
nach DIN EN ISO 9001:2008



Medizintechnik &
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel
Prüfungen und Reparaturen

STERIFEED
.com

Kompakter Muttermilch-Pasteurierer T30



Art.-Nr.:
T30 Kompakter Muttermilch-Pasteurierer (3 Liter)

Dieser kompakte 3-Liter-Pasteuriser-Halbbautomat wurde entwickelt, um eine Qualitätskontrolle für gespendete Muttermilch oder Spezialnahrung zu ermöglichen. Geeignet für den Einsatz in Muttermilchbanken zur Pasteurisierung von Spendermilch oder in pädiatrischen Diätküchen zur Infektionskontrolle der Pasteurisierung von Spezialdiäten.

- Tischgerät
- 3-Liter-Fassungsvermögen (12 Flaschen 130ml/250 ml)
- Mit dem Protokolliersystem eine vollständige Überprüfung der „Milchtemperatur“ während des gesamten Zyklus.
- Schnelle Kühlung auf 25°C innerhalb 10 Minuten mit Endtemperatur von 10 °C
- Umweltfreundlich (kein Bedarf an großen Wassermengen)
- Keine Mindesttemperatur für Einlaufwasser erforderlich

Die behandelte Milch entspricht allen großbritannischen und internationalen Richtlinien einschließlich kontrollierter Kühlung auf 10 °C (auch 4 °C möglich) ohne Gefährdung der Sicherheit. Die schwankenden Temperaturen kalten Leitungswassers können dieses Sicherheitsniveau nicht bieten.

Die Leistung des T30-Pasteurierers entspricht den größeren 9-Liter- und 18-Liter-Pasteurisierern.

Auswahl zwischen zwei Programmen zur Eingabe bestimmter Temperaturen und Zeiten, normalerweise: 63 °C x 30 Minuten für Muttermilch.

Schnelle, präzise Kühlung der Nahrung von 63 °C auf 25 °C innerhalb von 10 Minuten mit Endtemperatur von 10 °C. Gesamtzyklusdauer beträgt 90 Minuten. Diese ist abhängig von der Temperatur des einlaufenden Heißwassers sowie der Raumtemperatur.

Programme Logic Control (PLC), um weitere Änderungen an Zeit und Temperatur zu ermöglichen. Der Sterifeed Logger benötigt keine direkte Verbindung zu einem PC.



Abb. Data-Logger

SORGEN FÜR IHR BABY



GET-Medizintechnik-Handel e.K. - Dekan-Schmid-Str. 11 - 89264 Weißenhorn

Tel. +49 (0) 7309-9275017 - E-Mail: info@get-medizintechnik.de - Web: www.get-medizintechnik.de



Qualitäts-Management
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung
nach DIN EN ISO 9001:2008



**Medizintechnik &
Sanitätshaus**

**Medizinischer Fachhandel
Prüfungen und Reparaturen**




Kompakter Muttermilch-Pasteurierer T30

Der Data-Logger erfasst jede Minute Messwerte, welche die genaue Temperatur der „Milch“, sowie Uhrzeit und Datum aufzeichnen. Diese Informationen werden in die mitgelieferte Software heruntergeladen, um von der zufriedensstellenden Behandlung jeder Charge eine dauerhafte Aufzeichnung zu erhalten.

Diese Informationen können entweder als grafische Darstellung oder in Listenformat ausgedruckt werden, um jederzeit einen Behandlungsnachweis erbringen zu können.

Die Flaschen werden während des Erwärmungszyklus eingetaucht, um zu gewährleisten, dass Milchtropfen im Hals und Verschlusskappenbereich dieselbe präzise Behandlung erfahren, wie die restliche Nahrung.

Während der Abkühlung sind die Flaschen nicht eingetaucht, um bei Auftreten eines Vakuums eine eventuelle Verdünnung durch Aerosole von Kühlwasser zu vermeiden. Es werden Flaschen mit einer Folienversiegelung empfohlen (für Milchbanken die höchste Sicherheitsvorkehrung).

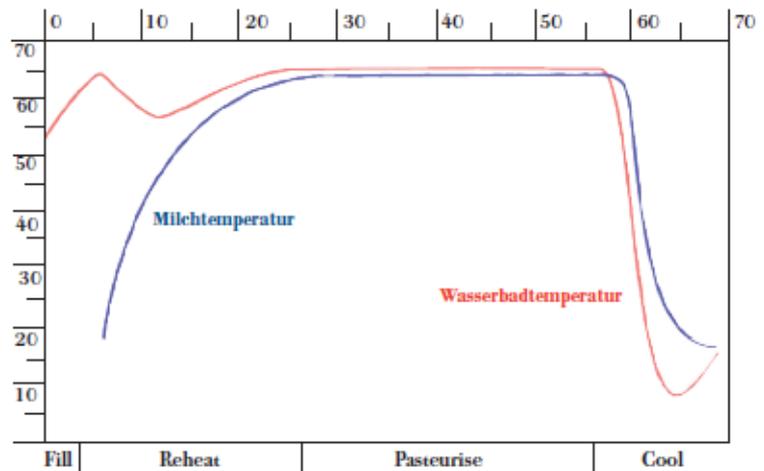

Grafische Darstellung von Zeit und Temperatur über 30 Minuten bei 63° C.

Technische Daten:	
Abmessungen in mm:	1100L X 600B X 450H
Elektrische Daten:	230V 50 Hz 2400 Watt 11FLA
Normen:	EN60204-1, EN294: 1992, AC: 1993 89/292.EEC, 91/368/EEC, 93/44EEC
Flaschenfüllvolumen:	12 x 250 ml = 3 Liter 12 x 130 ml = 1,56 Liter
Bauweise:	Edelstahl
Garantie:	1 Jahr Garantie für einwandfreie Materialqualität und Verarbeitung

SORGEN FÜR IHR BABY



GET-Medizintechnik-Handel e.K. - Dekan-Schmid-Str. 11 - 89264 Weißenhorn

Tel. +49 (0) 7309-9275017 - E-Mail: info@get-medizintechnik.de - Web: www.get-medizintechnik.de