



Qualitäts-Management  
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung  
nach DIN EN ISO 9001:2008



Medizintechnik &  
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel  
Prüfungen und Reparaturen

STERIFEED  
.com

## ICS-600 & Flaschen mit Folien-Sicherheitsverschluss



Abb. Flaschen mit Folien-Sicherheitsverschluss

Die wahrscheinlich wichtigste Neuentwicklung von STERIFEED ist der induktionsversiegelte Kappenverschluss für Vorratsflaschen, der bei der Pasteurisierung und dem Transport bis zur Verwendungsstelle absolute Sicherheit bietet.

Der Sicherheitsverschluss verhindert, dass während der Pasteurisierung und Kühlung auch nur kleinste Mengen Wasser die Milch verdünnen.

Die Verschlüsse verfügen über einen Flügel, um zu vermeiden, dass beim Abziehen der Sicherheitsfolie der Flaschenhals berührt wird. Somit ist sichergestellt, dass die pasteurisierte Muttermilch während der Pasteurisierung und beim Öffnen nicht kontaminiert wird.

Es entstehen keine zusätzlichen Betriebskosten, lediglich ein geringfügiger Aufpreis für die Metallfolien, sowie die einmaligen Anschaffungskosten für das STERIFEED Induktions Versiegeler.

### Beschreibung

Mit dem ICS-600 können die Flaschen von Sterifeed mit einer Metallfolie versiegelt werden. Die Metallfolie befindet sich im Deckel, welcher auf die Flaschen geschraubt wird. Durch Induktion wird die Folie durch den Deckel erhitzt und mit dem Flaschenrand verschmolzen.

Der ICS-600 ist nur zum Versiegeln von Muttermilch-Sammelflaschen von Sterifeed geeignet. Bei der Pasteurisierung von Muttermilch empfehlen wir die Flaschen mit dem ICS-600 zu versiegeln, um den Flascheninhalt optimal vor dem Eindringen von Keimen zu schützen.

Das Gerät besteht aus zwei Teilen, dem Induktionsversiegler sowie dem Handapplikator.



Abb. ICS-600 Folienversiegelungsgerät

SORGEN FÜR IHR BABY



GET-Medizintechnik-Handel e.K. - Dekan-Schmid-Str. 11 - 89264 Weißenhorn

Tel. +49 (0) 7309-9275017 - E-Mail: info@get-medizintechnik.de - Web: www.get-medizintechnik.de



**Qualitäts-Management**  
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung  
nach DIN EN ISO 9001:2008



**Medizintechnik &  
Sanitätshaus**

**Medizinischer Fachhandel  
Prüfungen und Reparaturen**



## ICS-600 & Flaschen mit Folien-Sicherheitsverschluss

Da man auf eine normale Wasserkühlung verzichtet hat, wurde die Nutzung von Generator und Arbeitsspule ganz bewusst eingeschränkt, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Zum Gebrauch des Gerätes den zugehörigen Handapplikator einstecken, dann das Anschlusskabel an eine Netzsteckdose mit Einphasenwechselstrom anschließen.

Auf dem Gerät sollte nun „Ready“ (Bereit) grün aufleuchten und somit zum Versiegeln bereit sein. Leistungsstufe und Zeitzyklen werden automatisch geregelt.

Für Verschlusskappen verschiedener Größe sind passende Applikatoren erhältlich, jedoch können auch mit Hilfe unterschiedlicher Positionsringe kleinere Verschlüsse in den mitgelieferten Applikator eingesetzt werden.

### Sicherheit

Die Spule im Handapplikator ist doppelt isoliert, allerdings nicht wasserdicht. Den Handapplikator nicht im Feuchten verwenden, da die Gefahr eines Stromschlages besteht!

Die nachfolgenden Artikel werden steril ausgeliefert. Der Deckel dieser Flaschen ist bereits mit einer Metallfolie ausgestattet:

### Artikel-Nr.:

**14195** Mehrweg-Flasche im versiegelten PE-Beutel 130ml (100 Stück)

**14196** Mehrweg-Flasche im versiegelten PE-Beutel 250ml (100 Stück)



Technische Daten:	
<b>Zeit:</b>	Der Erwärmungszyklus beträgt 2 Sekunden mit einer weiteren Sekunde Verzögerung vor Beginn des nächsten Zyklus.  Versiegelungsdauer = 1,0 - Sekunden.
<b>LED-Anzeigen:</b>	<i>Ready:</i> zeigt die Bereitschaft des Gerätes an. <i>Fault:</i> leuchtet bei einer Störung des Gerätes. <i>RF:</i> leuchtet bei Auslösung der Induktion.
<b>Spule:</b>	Die fünfpolige Hülse ist für das Netzstromkabel (Ausgang) zur Verbindung mit Arbeitsspule und Starttaste vorgesehen.
<b>Stromversorgung:</b>	Stromversorgung (Eingang) - 230 V + 5% - 10% 50 - 60 Hz.
<b>Sicherung:</b>	3,15 Amp

SORGEN FÜR IHR BABY



GET-Medizintechnik-Handel e.K. - Dekan-Schmid-Str. 11 - 89264 Weißenhorn

Tel. +49 (0) 7309-9275017 - E-Mail: info@get-medizintechnik.de - Web: www.get-medizintechnik.de